

## レスピマツトの初回準備方法 (薬品名:スピリーバ)

※ テスト噴霧は4回繰り返す <5回目から吸入可能>

### ボンベ装着

- キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら、透明ケースを外します
- ボンベ上部の緑色の部分を器具に挿入します
- ボンベをかたい平面の上でゆっくり押し込んで、カチッと音がするまで挿入します
- 外しておいた透明ケースを装着します




### テスト噴霧(4回)

- キャップを閉じた状態で上向きにしてもち、透明ケースを赤い矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させます (B)
- キャップを完全に開けます (C)
- 吸入口を下に向け噴霧ボタンを押し、ミスト(霧)が見えるのを確認します(薬が目に入らないように注意)
- キャップを閉じます



## レスピマツト 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ)

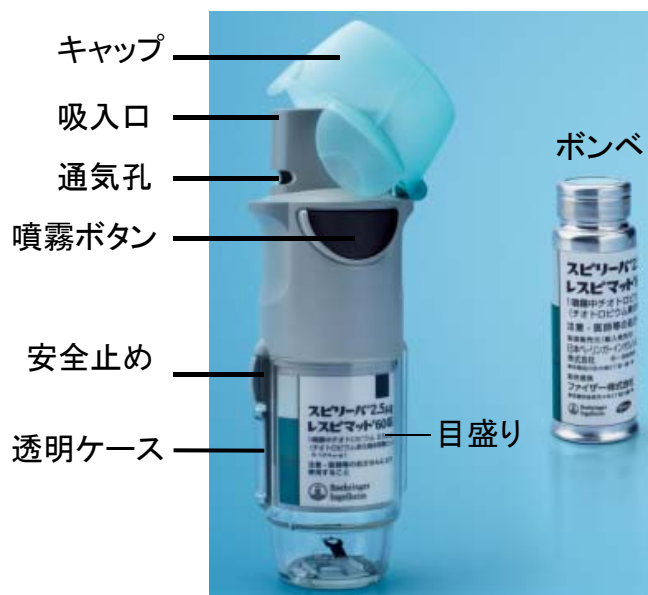

## レスピマツトの吸入手順(薬剤師用) (薬品名:スピリーバ)

※ 初回準備方法(ボンベ装着・テスト噴霧)は1枚目(1/2)を参照

