


## ロタディスクのディスク装着方法 (薬品名:セレベント、フルタイド)


※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)

ディスク装着方法

- カバーを外します (A)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出します (B)
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
- ディスクをのせたトレーを本体に「カチッ」と音がするまで押し戻します (E)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)

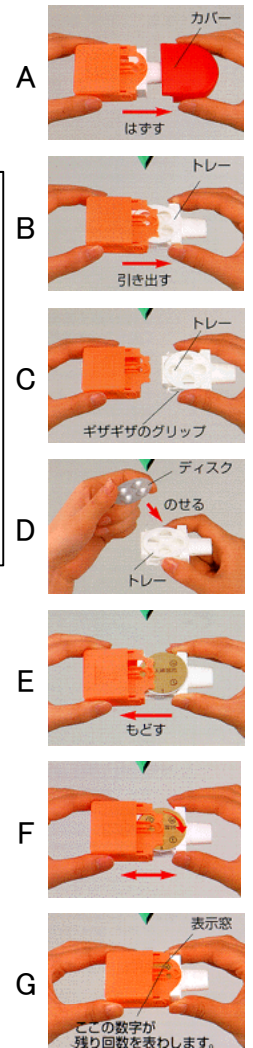

## ロタディスク 各部位の名称 (薬品名:セレベント・フルタイド)



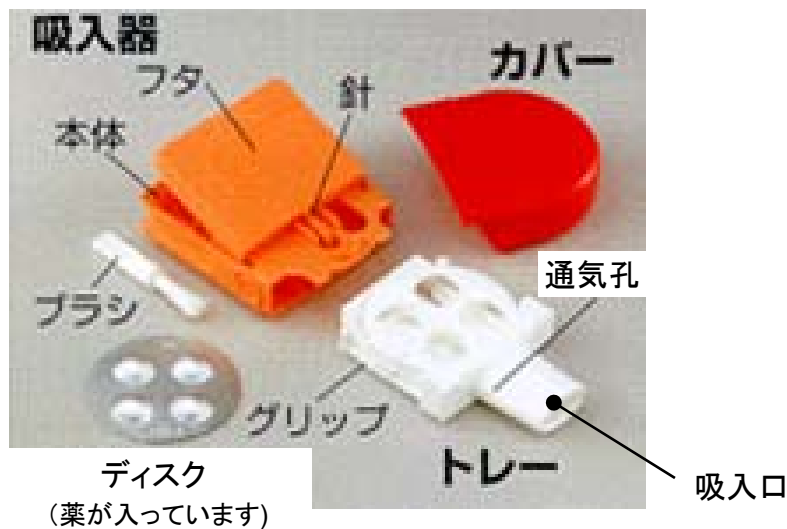


## ロタディスクの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:セレベント、フルタイド)

※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください

※ ディスク装着方法は1枚目(1/2)を参照

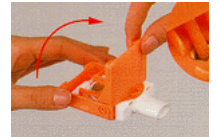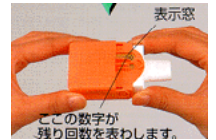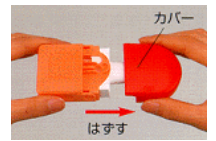

### ① 薬の準備

- カバーを外します
- 表示窓で残量を確認します
- フタを垂直になるまで立て、再び閉じます  
(ディスクに針が貫通し、薬を吸入できる状態になります)

### ② 息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐き出します  
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

### ③ 吸入

- 吸入口をくわえ、深く息を吸い込みます  
(吸入口をくわえすぎると、空気孔をふさいでしまうので注意)

### ④ 息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます

### ⑤ 息吐き

- 息をゆっくり吐き出します

### ⑥ 後片付け

- 使用後はディスクを回転させ、残りの回数を表示してからカバーをします

※もう1回吸入をする場合

### ⑦ うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します