


## エアゾール+スプレーの初回準備方法 (薬品名:エアゾール全般)

- ※ 新しい吸入器は下記の操作を3回繰り返します(空噴霧)
- ※ カウンター付きの製剤は規定の回数を空噴霧します

空  
噴  
霧

- キャップを外します
- 吸入器を5回振ります
- 吸入器のポンベを押すと霧状のガスが出ます

## エアゾール 各部位の名称 (薬品名:エアゾール全般)

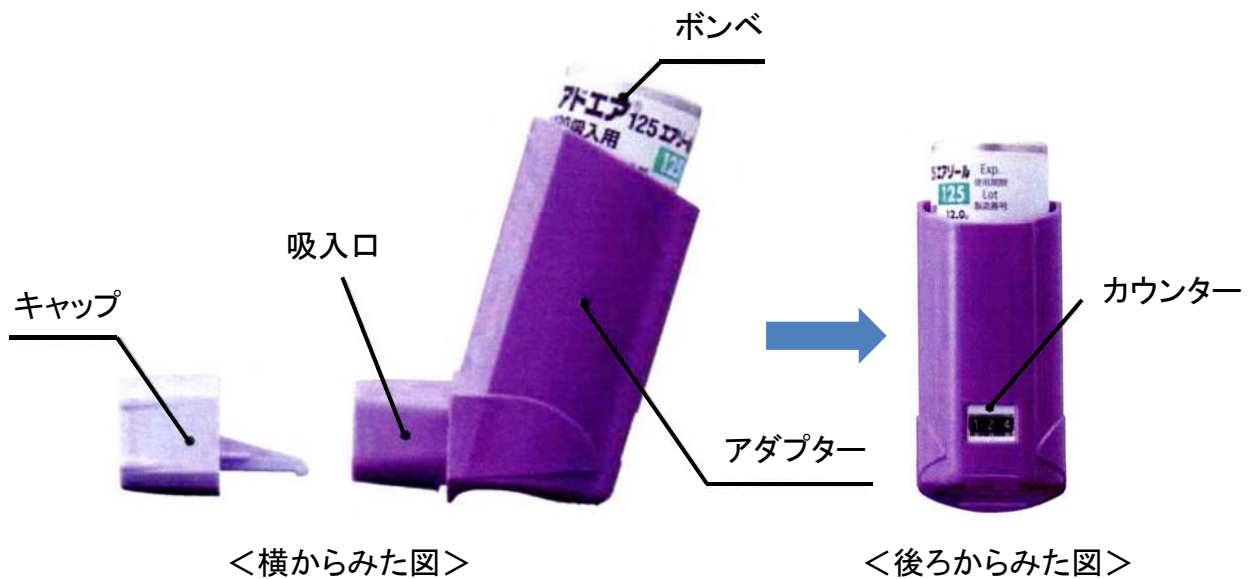


## エアゾール+スプレーの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:エアゾール全般)

※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい  
※ 初回準備方法(空噴霧)は1枚目(1/2)を参照

専用スプレーあり
オルベスコ
キューバール
メプチン
ペロテック
アイミロール
テルシガン
アトロベント
インタール

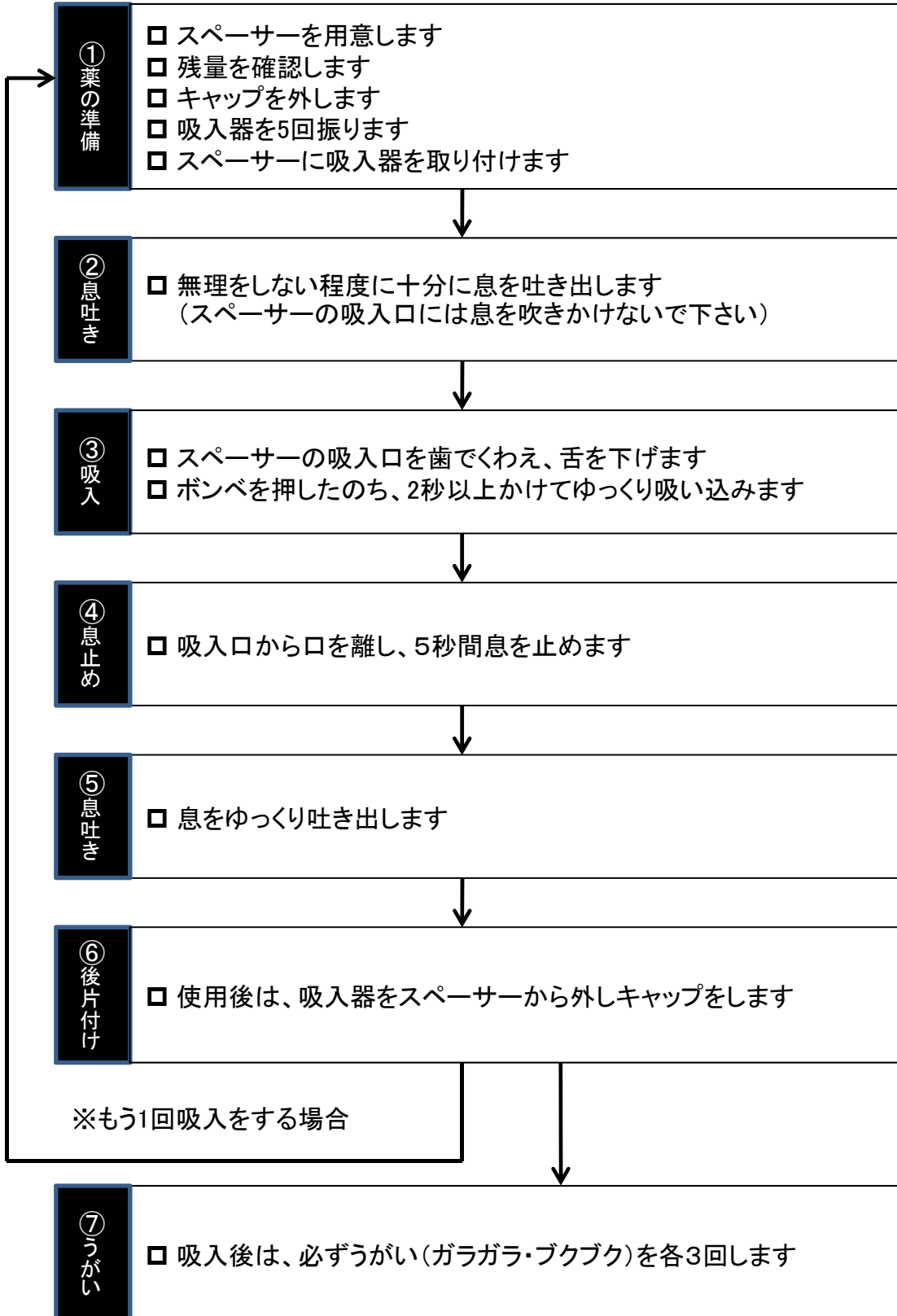

吸入できない場合  
↓  
疑義照会

※もう1回吸入をする場合

# 吸入補助具一覽

<p>オルベスコ</p>	 <p>専用スペーサー</p>	
<p>キューバル アイミロール</p>	  <p>デュオペーサー      デュオペーサー（マスク付）</p>	
<p>テルシガン アトロベント ベロテック</p>	 <p>インハレーションエイド</p>	
<p>インタール</p>	  <p>ファイソンエアー      マイクロエアー</p>	
<p>メプチン</p>	  <p>ポケットスペーサー      吸入スぺーダー</p>	
<p>MDI 製剤 広範囲で 使用可 (有料)</p>	     <p>例：エアロチャンバー      例：オプティヘラー</p>	